

Návod k použití – nasazení šátku

Před nandáním antivirového šátku si vždy důkladně umyjte ruce nebo použijte antibakteriální gel, stejně postupujte i po sundání šátku.

- Umyjte si ruce vodou a mýdlem nebo použijte desinfekci.
- Srolujte antivirový šátek a opatrně jej přetáhněte přes hlavu.
- Přitiskněte nosní klip ke kořenu nosu a jemně vytvarujte.
- Pomocí vzadu umístěné elastické šňůrky s brzdičkou utáhněte šátek tak, aby vám pevně držel.



Návod k použití – sejmutí šátku

- Uvolněte nosní klip a elastickou šňůrku, opatrně sejměte šátek
- Umyjte si ruce vodou a mýdlem nebo použijte desinfekci
- Šátek vyperte či sterilizujte

Upozornění: Správně nasazený šátek u dospělých lidí nezakrývá uši. **Klip nikdy nepřehýbejte napůl, ani při nasazování šátků, ani při jeho údržbě či skladování!**



Péče o drátek

Před praním

Před každým praním drátek vyjměte. Drátek je z hliníku a mohl by se v pračce poškodit.



Nepřehýbat

Šátek nepřehýbejte v oblasti drátku na polovinu. Drátek je z hliníku a může se poškodit.



Údržba Antivirového šátku nanoSPACE

Antivirový šátek perte v pracím gelu či prášku bez obsahu chlóru a fosforu. Ideální je jádrové mýdlo. Nedoporučujeme sušení v sušičce, a to ani na nízkou teplotu.

Pokud šátek používáte k ochraně před viry, vždy jej po používání sterilizujte, například pomocí [dezinfekce vhodné na nanovláknenné produkty](#). Šátek lze prát na 40° C, ale abyste udrželi membránu co nejdéle funkční, doporučujeme šátek prát v ruce či v pračce na jemnější cyklus (ideální je program pro ruční praní). Vypraný šátek nechte 12 až 24 hodin uschnout volně pověšený na šňůře nebo na topení. Pokud perete šátek v ruce, postupujte opatrně, abyste nepoškodili nanovláknenný filtr. Nepoužívejte bělidla, změkčovadla nebo jiné agresivní přípravky, šátek nesušte v sušičce a nežehlete. Při dodržení těchto zásad si výrobek **zachovává většinu filtrační účinnosti i po několika desítkách pracích cyklů.**

Výrobce nano membrány nedoporučuje sterilizaci UVC lampou (germicidní lampa), neboť se jedná o silné oxidační činidlo!

Rozměry

Šátek: orientační rozměry šátku: 32 x 27 cm (měřeno na horní hraně šátku, šířka šátku měřená v různých místech se může lišit až o 1 cm)

Filtr: orientační rozměry filtru: 15 x 21 cm

Jedná se o ruční výrobu, rozměry se mohou lišit.

Ekologické balení nanošátků nanoSPACE



Ekologie je v naší firmě velmi silné téma, a proto jsme se rozhodli investovat i do ekologičtější varianty balení. Krabičky na antivirové šátky jsme nechali vyrobit z papíru z trávy, který se získává z dosud nevyužívaných zemědělských kompenzačních ploch. Ty jsou předepsané zákonem a nejsou ani hnojeny, ani chemicky ošetřovány. Papír z trávy k výrobě vlnité lepenky se vyrábí z cca 30 % travních pelet a ze zhruba 70 % sběrového papíru. Travní pelety pro výrobu papíru se zpracovávají výlučně mechanicky, takže je zapotřebí jen velmi málo vody a energie.

Upozornění

Výrobek není vhodný pro děti do 3 let věku a do velikosti ošacení 110.

Složení

Textilní materiál (pletenina): 100% polyester

Filtrační nanovláknenný materiál: 95 % polypropylen a 5 % PA6

Výrobce

nanoSPACE s.r.o., Rohova 98, Domažlice 344 00